

ANPASSNING, KOMBINATIONER OCH SPECIALANPASSNING

Utöver Minicrosser ABs tillbehör är det tillåtet att använda andra fabrikanter CE-märkta tillbehör. Detta under förutsättning att huvudartikeln inte behöver anpassas för att tillbehören skall kunna monteras. Befintliga fästpunkter på huvudartikeln skall användas. Klämfästen där ingen åverkan görs i ramens konstruktion är tillåtet att använda för montering av annan fabrikants tillbehör.

Tillbehör från annan fabrikant som får monteras på Minicrosser ABs huvudartiklar:

- Bälten, västar och selar
- Lösa sittedynor på plansits, maximal tillåtna höjd är 10 cm
- Huvudstöd / Nackstöd och dynor som monteras på originalfäste
- Bålstöd / Bålstödsdynor som monteras på originalfäste
- Armstödsplattor och sidostödsplattor
- Sitsöverdrag
- Bord
- Vred, rattar och skruvar

Vid montering av annan fabrikants tillbehör får kraften på originalfäste (moment, tryck och drag) inte överstiga den kraft som original tillbehör utvecklar.

Anpassning på originalartikel som får utföras med bibehållen CE-märkning:

- Sitsdynor – längd – 10 cm till + 5cm, bredd – 10 cm till + 5cm, höjd +/- 5 cm
- Ryggdynor – längd – 10 cm till + 5cm, bredd – 10 cm till + 5 cm, tjocklek +/-5 cm
- Armstödsplattor – längd +/- 7 cm, bredd +/- 5 cm, höjd + 5 cm och överdrag
- Byte av vred, rattar och skruvar

Specialanpassning – anpassning av produkt som kräver förändring i grundkonstruktion får inte utföras med bibehållen CE-märkning. Detta är specialanpassning och skall dokumenteras som sådan. Vid specialanpassad produkt utfaller ingen garanti.

Krav vid återställande av specialanpassad produkt:

- Specialanpassad produkt får återställas av certifierad tekniker inom landstinget. Detta under förutsättning att det finns tecknat auktorisationsavtal eller att adekvat utbildning på produkten har genomgått.
- Anpassade delar avlägsnas och ersätts med originaldelar från Minicrosser AB. Dokumentation över vilka åtgärder som krävs för att återställa produkten samt bild skall skickas till huvudkontorets Teknisk service som gör en bedömning att produkten återställts till originalskick.
- Märkningen "specialanpassad produkt" tas bort och ersätts med ett CE-märke.
- Vid anpassningar utförda av Minicrosser AB kontakta Teknisk service för information gällande utförd specialanpassning.

Råder det tveksamhet i vad som är tillåtet att utföra inom ramen för anpassning kontakta Teknisk service för rådgivning, tel. 0303-24 52 00.

Minicrosser AB

Bultgatan 28
S-442 40 Kungälv

Org nr: 5565298816

T +46 (0)303-24 52 00
F +46 (0)303-24 52 28
info@minicrosser.se
www.medema.com



medema gruppen