

Serviceanvisning
för
vagn
Tom 5 Streeter



Innehåll

1	Rutiner för rengöring	3
2	Checklista vid leverans	4
3	Rutiner för underhåll	5
4	Rutiner för rekonditionering	6
5	Broschyr	7
6	Reservedelslista	8
7	Tillbehör	11
8	Utfört service	13


Information om producent och leverantör

Producent


PATRON Bohemia a.s.
Ceskolipska 3419,
CZ-27601 Melnik
Tfn: +420 315 630 135
Fax: +420 315 630 199
E-post: reha.en@patron.eu
Internett: www.patron.eu

Leverantör


Minicrosser AB
Bultgatan 28
442 40 Kungälv
Tfn: + 46 (0)304-348 80
Fax: + 46 (0) 304-348 88
E-post: info@minicrosser.se
Internett: www.minicrosser.se

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	RUTIN FÖR RENGÖRING:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
1	Tom 5 Streeter		
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR


	Produkt	<i>UTFÖRT AV:</i>	<i>UTFÖRT DATUM:</i>
1	Rengör klädseln med fuktig trasa. Klädseln kan tvättas i maskin på 40°C. Klädseln ska dropptorka, använd inte torktummalare		
2	Rengör underredet med milt såpavatten och fuktig trasa		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
13			
14	Smörj rörliga delar		

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	GENERELL CHECKLISTA VID LEVERANS:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
2	Tom 5 Streeter	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR


	Produkt	<i>UTFÖRT AV:</i>	<i>UTFÖRT DATO:</i>
1	Är emballaget skadat?		
2	Kontrollera så att alla delar är intakta		
3	Kontrollera att hjulen är oskadda		
4	Kontrollera att underredet inte är skevt eller har lackskador		
5	Kontrollera mot följersedeln att samtliga delar är levererade		
6	Kontrollera att tillbehör är korrekt monterat		
7			
8			
9			
10			
11			
13			
14			
15			
16			
17			
18	Kontakta speditör eller leverantör vid skada eller fel		

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	GENERELL CHECKLISTA FÖR PERIODISK UNDERHÅLL:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
3	Tom 5 Streeter	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR


POS	BESKRIVNING	DAGL.	1 GÅNG MND.	1 GÅNG ÅR
1	Kontrollera spaken för hopfällning			
2	Kontrollera fästena till körbygeln			
3	Kontrollera lås och krokar			
4	Kontrollera fästen och klämmor för att lossa handtaget			
5	Kontrollera bromsar			
6	Kontrollera hjul och däck. Vid luftfyllda hjul bör däcktrycket kontrolleras			
7	Rengör klädsel med ljummet vatten och mild såpa			
8	Rengör underrede med en fuktig trasa			
9	Reparera lackskador			
10	Smörj alla rörliga delar			
11	Kontrollera alla skruvar och dra åt vid behov			

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	GENERELL CHECKLISTA VID REKONDITIONERING AV:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
4	Tom 5 Streeter	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR

POS	BESKRIVNING	UTF. DATUM	SIGN.
1	Klädsel och polster skall bytas vid behov		
2	Rengör underrede med en fuktig trasa		
3	Reparera eventuella lacksakdor		
4	Kontroller/justera bromsar		
5	Kontrollera hjul och däck		
6	Smörj alla rörliga delar		
7	Kontrollera alle skruvar och dra åt vid behov		
8			
9			
10	BRUKSANVISNING: Skall läggas i en plastficka och fästas på produkten		
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	BROSCHYR:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
5	Tom 5 Streeter	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR

POS	BESKRIVNING	UTF. DATUM	SIGN.
1	Bruksanvisning för Tom 5 Streeter		
2	Serviceanvisning för Tom 5 Streeter		

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	Reservedlar:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
6	Tom 5 Streeter	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR


Art.nr	Stl	Nr Sprängskiss	Pos nr	Produktbenämning	Enhet
NKZ90000375AA	MAXI	SVR00031	126A	Framhjul Tom 5 Streeter massivt R175/45 grå	st
	STD	SVR00051	126A		
	MINI	SVR00071	126A		
NKZ90000376AA	MAXI	SVR00030	81A	Bakhjul Tom 5 Streeter massivt R260/55-5 grå	st
	STD	SVR00050	81A		
	MINI	SVR00070	81A		
NKZ90000395AA	MAXI	SVR00030	81B	Bakhjul Tom 5 Streeter massivt R310/55-5 svart	st
	STD	SVR00050	81B		
	MINI	SVR00070	81B		
NKZ90000340AA	MAXI	SVR00031	126B	Framhjul Tom 5 Streeter massivt R200/50	st
	STD	SVR00051	126B		
	MINI	SVR00071	126B		
NKZ90000368AA	MAXI	SVR00030	403	Däck Tom 5 Streeter	st
	STD	SVR00050	403		
	MINI	SVR00070	403		
NKZ27400031AA	MAXI	SVR00030	402	Slang Tom 5 Streeter	st
	STD	SVR00050	402		
	MINI	SVR00070	402		
NKZ90000021AA	MAXI	SVR00031	90	Framgaffel Tom 5 Streeter t länkhjul inkl riktningsspärr	st
	STD	SVR00051	90		
	MINI	SVR00071	90		
MONREHM0100961AA	MAXI	SVR00033	2	Bromsspak Tom 5 Streeter vä	st
	STD	SVR00053	2		
	MINI	SVR00073	2		
MONREHM0100960AA	MAXI	SVR00033	5	Bromsspak Tom 5 Streeter hö	st
	STD	SVR00053	5		
	MINI	SVR00073	5		
ZNCKKK31500018AA	MAXI	SVR00033	9B	Fjäder t broms Tom 5 streeter massivt hjul	st
	STD	SVR00053	9B		
	MINI	SVR00073	9B		
ZNCKKK31500021AA	MAXI	SVR00033	9A	Fjäder t broms Tom 5 streeter luftpumpat hjul	st
	STD	SVR00053	9A		
	MINI	SVR00073	9A		
NKZ90000373AA	MAXI	SVR00034	10	Låsmekanism Tom 5 Streeter övre del	st
	STD	SVR00054	10		
	MINI	SVR00074	10		
NKZ90000373BA	MAXI	SVR00030	75	Låsmekanism Tom 5 Streeter nedre del	st
	STD	SVR00050	75		
	MINI	SVR00070	75		
NKT28300319BA	MAXI	SVR00034	113	Fjädringsstopp Tom 5 Streeter	st
	STD	SVR00054	113		
	MINI	SVR00074	113		

RESERVDLAR

SITS

NKZ90000251AA	MAXI	SVR00034	3	Led t vinkeljustering körhandtag Tom 5 Streeter	st
	STD	SVR00054	3		
	MINI	SVR00074	3		
MONREHM0101048AA	MAXI	SVR00030	E	Sitsstilt Tom 5 Streeter kpl	st
	STD	SVR00054	E		
	MINI	SVR00031	E		

NKZ90000374AA	MAXI	SVR00031	108	Riktningsspärr Tom 5 Streeter	st
	STD	SVR00051	108		
	MINI	SVR00071	108		
NKT28300166AA	MAXI	SVR00040	6	Spak t justering av ryggstöd Tom 5 Streeter	st
	STD	SVR00060	6		
	MINI	SVR00080	6		
POF28300308AA	MAXI	SVR00044	10	Plugg t fotstöd Tom 5 Streeter 60x23	st
	STD	SVR00064	10		
	MINI	SVR00084	10		
NKZ90000324AA	MAXI	SVR00042	5	Fäste t sufflett Tom 5 Streeter	st
	STD	SVR00062	5		
	MINI	SVR00082	5		
NKT28300321AA	MAXI	SVR00044	17	Spak t justering av fotstö Tom 5 Streeter	st
	STD	SVR00064	17		
	MINI	SVR00084	17		
PORT5SMYYR--01AA		SVR00085		Klädsel Tom 5 Streeter Mini kpl	set
PORT5SYYYR--01AA		SVR00065		Klädsel Tom 5 Streeter Std kpl	set
PORT5SXYYR--01AA		SVR00045		Klädsel Tom 5 Streeter Maxi kpl	set


LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	Tillbehör:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
7	Tom 5 Streeter	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR

Tom 5 Streeter har som standard

Höftbälte
Avtagbar sits som kan vändas mot körriktningen
Djupjusterbar sits, steglös
Breddjusterbar sits, steglös
Tilt, steglös
Höjdjusterbar rygg, steglös
Vinkeljusterbar rygg till det närmaste liggande ställning, steglös
Massiva hjul
Avtakbar handbåge
Höjdjusterbart körhandtag
Korg under sits
Klädsel med ljusreflekterande detaljer för ökad trafiksäkerhet
Ihopfällbar , i en eller två delar

Art.nr	Produktbenämning
T5SYKPMYY	Sittvagn Tom 5 Streeter Mini m fasta framhjul
T5SYKPYYY	Sittvagn Tom 5 Streeter Std m fasta framhjul
T5SYKPXY	Sittvagn Tom 5 Streeter Maxi m fasta framhjul
T5SWKPMYY	Sittvagn Tom 5 Streeter Mini länkhjul m riktningsspärr
T5SWKPYYY	Sittvagn Tom 5 Streeter Std länkhjul m riktningsspärr
T5SWKPXY	Sittvagn Tom 5 Streeter Maxi länkhjul m riktningsspärr
Art.nr	Tillbehör
TBR-PAT3	Trumbroms Tom 5 Streeter kpl m stora bakhjul stl 3
RPRK055S0	Bälte 5-punkts Tom 5 Streeter Mini/Std
RPRK055M0	Bälte 5-punkts Tom 5 Streeter Std/Maxi
RPRK065S0	Bälte 4-punkts Tom 5 Streeter Mini/Std
RPRK065M0	Bälte 4-punkts Tom 5 Streeter Std/Maxi
RPRK054XS	Abduktionssele Tom 5 Streeter Mini
RPRK054S0	Abduktionssele Tom 5 Streeter Std
RPRK054M0	Abduktionssele Tom 5 Streeter Maxi
RPRK053XS	Abduktionskloss Tom 5 Streeter Mini
RPRK053S0	Abduktionskloss Tom 5 Streeter Std
RPRK053M0	Abduktionskloss Tom 5 Streeter Maxi
RPRK02202	Väska Tom 5 Streeter f montering på körhandtag
RPRK01706	Bord Tom 5 Streeter universal
3012025	Fot/Ankelfixering Tom 5 Streeter mini par
3012026	Fot/Ankelfixering Tom 5 Streeter Std/Maxi par
3012033	Fotremmar m plastspänne Tom 5 Streeter par
RPRK056XS	Huvudstöd Tom 5 Streeter Mini
RPRK056S0	Huvudstöd Tom 5 Streeter Std

RPRK056M0	Huvudstöd Tom 5 Streeter Maxi
RPRK069S0	Höftbälte Tom 5 Streeter Mini
RPRK069M0	Höftbälte Tom 5 Streeter Std/Maxi
HÄND-PATRON1	Handbåge Tom 5 Streeter Mini m polstring
HÄND-PATRON2	Handbåge Tom 5 Streeter Std m polstring
HÄND-PATRON3	Handbåge Tom 5 Streeter Maxi m polstring
Art.nr	Produktbenämning
RPRK00108	Sufflett Tom 5 Streeter Mini inkl regnskydd
RPRK00109	Sufflett Tom 5 Streeter Std/Maxi inkl regnskydd
RPRK068UN	Knädelare Tom 5 Streeter (inte abduktionskloss)
RPRK070M0	Vadstöd m fixering Tom 5 Streeter Std/Maxi
RPRK04301	Svankstöd Tom 5 Streeter Mini
RPRK04302	Svankstöd Tom 5 Streeter Std
RPRK04303	Svankstöd Tom 5 Streeter Maxi
RPRK028S0	Nackstöd Tom 5 Streeter Mini /Std
RPRK028M0	Nackstöd Tom 5 Streeter Std/Maxi
RPRK075S0	Huvudstöd Tom 5 Streeter Mini/Std modell m vingar
RPRK075M0	Huvudstöd Tom 5 Streeter Std/Maxi modell m vingar
RPRK003S0	Bälstöd Tom 5 Streeter Mini par
RPRK003M0	Bälstöd Tom 5 Streeter Std/Maxi par
RPRK072UN	Tiltlås Tom 5 Streeter f spastiska brukare
RPRK014S0	Åkpåse Tom 5 Streeter Mini/Std modell sommar
RPRK014M0	Åkpåse Tom 5 Streeter Std/Maxi modell sommar
RPRK015S0	Åkpåse Tom 5 Streeter Mini/Std modell vinter
RPRK015M0	Åkpåse Tom 5 Streeter Std/Maxi modell vinter
SH311XS	Väst Stayflex u blixtlås (passar Tom 5 Streeter Mini)
SH310S	Väst Stayflex m blixtlås (passar Tom 5 Streeter Std)
SH310M	Väst Stayflex m blixtlås (passar Tom 5 Streeter Maxi)
RPRK03703	Korg Tom 5 Streeter fasta framhjul tyg "heavy duty"
RPRK03704	Korg Tom 5 Streeter länkhjul tyg "heavy duty"
RPRK07104-S	Korg Tom 5 Streeter fasta framhjul metall "heavy duty"
RPRK07104	Korg Tom 5 Streeter länkhjul framhjul metall "heavy duty"
RPRK04201	Sidoskydd förlängt Tom 5 Streeter
RPRK05903	Sufflett Tom 5 Streeter justerbar t Maxi (passar t större brukare)

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	UTFÖRT SERVICE PÅ	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
8	Tom 5 Streeter	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR

POS	BESKRIVNING	UTF. DATUM	SIGN.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			